

ATOMO

Apparecchio per aerosolterapia
Compressore rotativo a pistone



HUMIFAST

Umidificatore per ambienti,
con flusso di vapore regolabile




MANUALE DELLE ISTRUZIONI

⚠ Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo
e conservarlo con l'apparecchio.

Safety
SPECIALISTI SANITARI
Via G. Di Vittorio, 17
20030 Bovisio Masciago (MI) Italy
WWW.SAFETY.IT

Safety

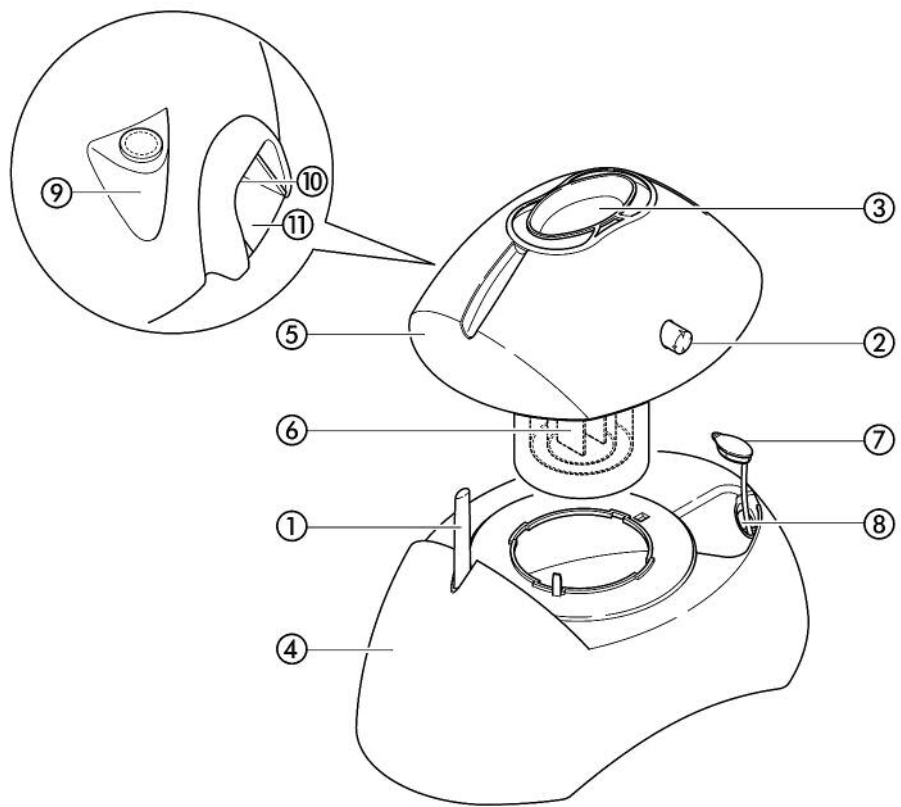

TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CASO DI RIPARAZIONE

**LA GARANZIA È VALIDA SOLO
ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE**

Apparecchio Tipo:.....

Modello:.....

N.Serie:.....

Data d'acquisto:.....

DATI DELL'ACQUIRENTE

Cognome e Nome:.....

Indirizzo:.....

Telefono:.....

Descrizione difetto:.....

.....

.....

Firma per accettazione delle condizioni di garanzia

Autorizzo l'uso delle informazioni sopra riportate
ai sensi della legge sulla Privacy: D. lg. 196/2003

CE

VERDE
848 580600
ADDEBITO RIPARTITO

RABBOCCO

- Per rabboccare l'umidificatore ruotare la campana **5** in senso antiorario. Aprire il tappo **7** e con un recipiente versare l'acqua in quantità desiderata nel foro **8**, facendo attenzione all'indicazione massima dell'indicatore di livello [Fig. H]. Nel caso il coperchio o il serbatoio si siano bagnati durante l'operazione di rabbocco, asciugarli prima di inserire il cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'UMIDIFICATORE

Terminato l'utilizzo dell'umidificatore, si raccomanda di svuotarlo completamente dell'acqua residua e di risciacquarlo. Non attenersi a tale regola provoca un aumento della conduttività dell'acqua causando i seguenti disturbi:

- rumore fastidioso nell'emissione di vapore
- fuoriuscita di gocce d'acqua
- consumo rapido degli elettrodi.

Qualora la quantità di vapore prodotta dall'apparecchio risulti diminuita procedere alla pulizia degli elettrodi dal deposito del calcare. La pulizia è molto semplice: utilizzare una soluzione anticalcare o dell'aceto, versarla in un contenitore e in seguito immergere gli elettrodi **6** della campana fino al livello indicato [Fig. I]. Lasciare agire per qualche ora, dopodiché risciacquare gli elettrodi **6** con acqua fredda ed asciugare accuratamente la campana con particolare attenzione alla presa del connettore.

Autonomia massima : 12 ore.


GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto comprovata dal timbro del rivenditore. Le condizioni di garanzia sono valide solo se al presente tagliando è allegato lo scontrino fiscale.
2. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che risultano difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
3. Le condizioni di garanzia decadono nel caso in cui l'apparecchio abbia subito interventi ad opera dell'utente o da parte di personale non autorizzato.
4. La garanzia non comprende:
 - Avarie o difetti causati da cattivo uso o errori di installazione;
 - Gli interventi per difetti presunti, verifiche di comodo o manutenzione ordinaria;
 - I componenti soggetti ad usura naturale;
 - Danni accidentali come cadute, urti, ecc.
5. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
6. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose od animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto d'istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Condizioni di reso

Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato l'apparecchio.

Se l'apparecchio presentasse difetti non coperti da garanzia o se la stessa fosse scaduta, tutte le spese di trasporto saranno a carico del cliente.

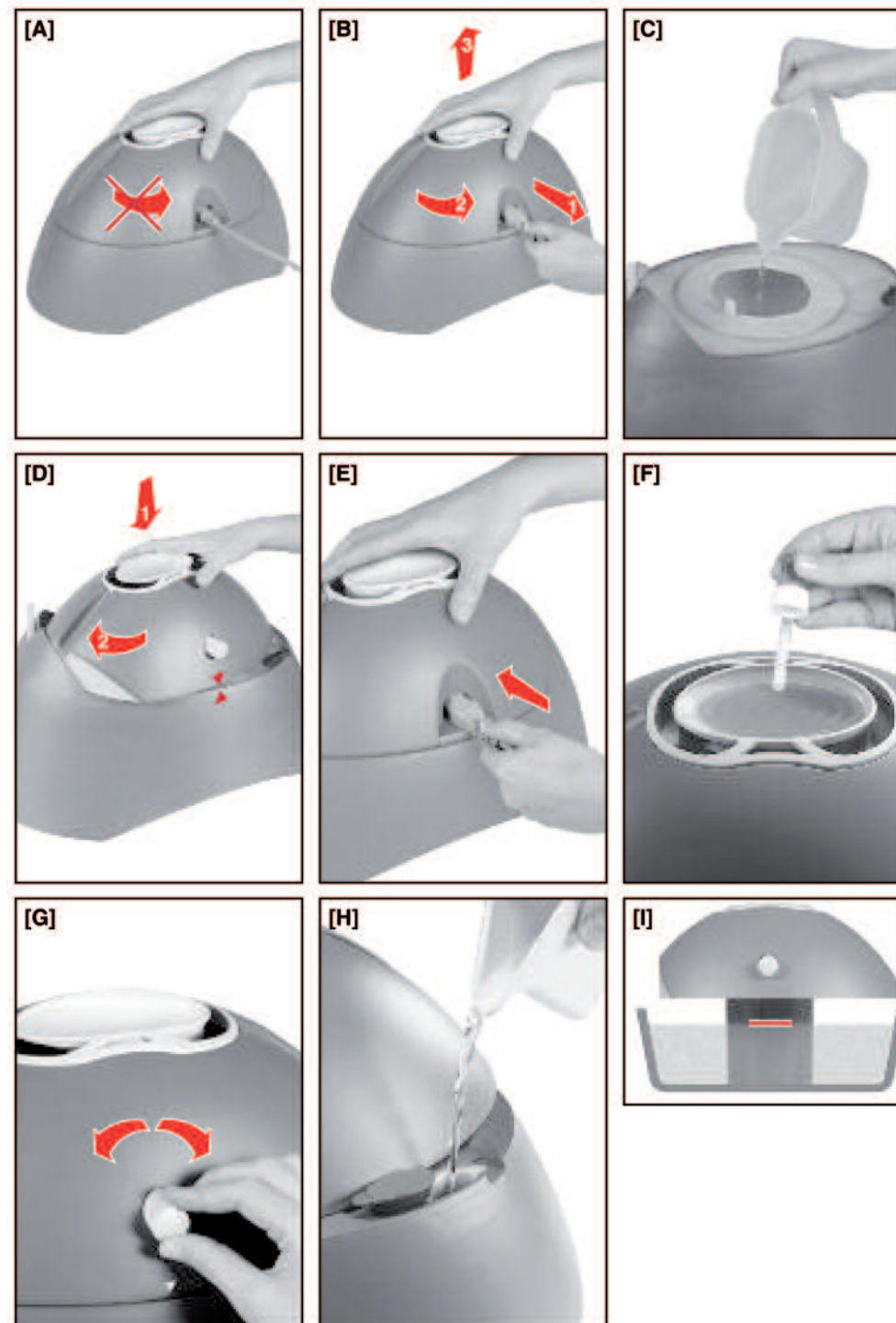

ATTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO: ESSE FORNISCONO IMPORTANTI INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DI INSTALLAZIONE, D'USO E DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

AVVERTENZE

1. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In particolare che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti che potrebbero essere stati causati dal trasporto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatola, cartone, ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
3. Prima di mettere in funzione l'apparecchio controllare che il cavo di alimentazione sia integro.
4. In caso di danneggiamento del cavo elettrico, sostituirlo esclusivamente con uno originale.
5. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La targa è situata nella parte inferiore dell'apparecchio.
6. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multiple e prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice, e sulle prolunghie, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
7. Questo apparecchio dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come umidificatore. Pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli.
8. L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole :
 - Non toccare mai l'apparecchio in funzione con mani bagnate o umide;
 - Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi;
 - Non tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina

- dalla presa di corrente;
- Non lasciare l'umidificatore esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole.);
 - Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- 9. Prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione e riempimento, disinserire l'umidificatore dalla rete di alimentazione elettrica, staccando la spina o spegnendo l'interruttore e attendere che si sia sufficientemente raffreddato.**
- 10.** In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente al rivenditore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e la validità della garanzia.
- 11.** Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante smaltendo separatamente il cavo di alimentazione, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi. Smaltire secondo norme vigenti.
- 12.** Per evitare pericolosi surriscaldamenti, svolgere il cavo di alimentazione in tutta la sua lunghezza.
- 13.** Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.

14. Attenzione!

Dall'apparecchio esce vapore a 100° C. PERICOLO DI SCOTTATURE

15. Tenere lontano i bambini per evitare scottature. Non dirigere il getto di vapore verso oggetti o pareti.
16. Il materiale di cui è costituita la vaschetta porta-essenze, è polipropilene (PP), che non è compatibile con olii eterici ed essenze aromatiche. Verificare la compatibilità di queste sostanze con la plastica prima di utilizzarle.
17. Non utilizzare l'apparecchio a tensione continua.

NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA.

NON DIRIGERE IL GETTO DI VAPORE VERSO ALCUN OGGETTO!

NON APPOGGIARE IL PRODOTTO SU TAVOLI IN LEGNO, CRISTALLO O PARQUET.

ISTRUZIONI GENERALI

DESCRIZIONE APPARECCHIO E ACCESSORI

- 1 Indicatore di livello dell'acqua
- 2 Manopola di regolazione vapore
- 3 Portaessenze
- 4 Serbatoio
- 5 Campana
- 6 Elettrodi
- 7 Tappo foro rabbocco
- 8 Foro per rabbocco
- 9 Spia luminosa
- 10 Connettore del cavo di alimentazione
- 11 Sede connettore

SISTEMA DI SICUREZZA

L'umidificatore è dotato di uno speciale sistema di sicurezza: la campana che poggia sulla parete superiore non può essere assolutamente ruotata e/o sollevata per essere separata dal corpo se il cavo di alimentazione è inserito nell'apparecchio [Fig. A].

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Per estrarre la campana **5** staccare la spina dalla presa di corrente a muro, togliere il cavo di alimentazione dell'apparecchio, ruotarla in senso antiorario e la sollevarla [Fig. B].
- Versare acqua fredda nel serbatoio **4** aperto fino a raggiungere l'indicazione MAX dell'indicatore di livello **1** [Fig. C]. Non superare mai questo limite di riempimento (massimo 4 litri).
- Usare acqua normale di rubinetto ed in nessun caso aggiungere sale o altro nel serbatoio.**
- Una volta riempito il serbatoio, mantenere l'apparecchio su un piano perfettamente orizzontale.
- Nel caso il coperchio si sia bagnato durante l'operazione di riempimento o di inserimento della campana, asciugarlo

prima di inserire il cavo di alimentazione.

- Per inserire la campana nel serbatoio, orientare la campana, in corrispondenza del simbolo ▲, verso il riferimento ▼ presente sul corpo dell'umidificatore [Fig. D]. Poi inserire la campana nel serbatoio e ruotarla in senso orario fino al suo arresto.

A questo punto il sistema di sicurezza consente l'inserimento del cavo di alimentazione nell'apparecchio [Fig. E].

- Prima dell'accensione dell'apparecchio, in caso di utilizzo di essenze, versare alcune gocce nell'apposito portaessenze **3** [Fig. F].

- Per accendere, inserire la spina nella presa di corrente. La vaporizzazione inizia dopo alcuni minuti. Il tempo di produzione vapore può variare in funzione della durezza dell'acqua.

- **Attenzione: assicurarsi che il connettore sia ben inserito nella spina dell'umidificatore.**

- L'accensione costante della spia luminosa **9** testimonia il corretto inserimento del connettore **10**. Qualora la spia **9** non si accendesse o si accendesse in modo instabile, verificare il corretto inserimento del connettore. Se il problema persiste, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al centro assistenza dedicato.

- Regolare l'intensità di vapore emessa tramite l'apposita manopola di regolazione **2** [Fig. G].

- Quando il livello dell'acqua all'interno del serbatoio raggiunge l'estremità inferiore degli elettrodi, l'erogazione di vapore diminuisce lentamente, fino a cessare. Nel serbatoio rimane una piccola quantità di acqua.

- Prima di effettuare un nuovo riempimento, si raccomanda di svuotarlo completamente dell'acqua residua, di risciacquarlo e di seguire le istruzioni per l'uso indicate più sopra.